

Kurzanleitung – So passen Sie Ihren Daumen-DigiSkin individuell an

Die Fingerspitze des ARTUS 3 wurde vollständig überarbeitet, sodass bestimmte Bereiche entfernt werden können, ohne die Funktion zu beeinträchtigen. **Verwenden Sie diese Anleitung, um Ihren DigiSkin individuell anzupassen.** Entfernen Sie so wenig Material wie möglich, um die bestmögliche Haltbarkeit zu gewährleisten!

Bevor Sie beginnen...



Drücken Sie den DigiSkin auf den Fingerabdruckbereich, bis er sich wie abgebildet auf sich selbst faltet. Dadurch entsteht Platz für den Schnitt.



Setzen Sie einen kleinen Schnitt in der Mitte und führen Sie die Schere vorsichtig ein, um die gewünschte Öffnung zu formen.



Freigabe des Fingerabdruckbereich

Vergrößern Sie das kleine Loch im mittleren Bereich zu einem Kreis. Führen Sie diesen Schritt schrittweise aus, beginnen Sie mit kleinen Schnitten und erweitern Sie diese bei Bedarf.

Für die meisten Anwender reicht dieser Schritt bereits aus, wenn keine sehr kleinen Clips verwendet werden. Wenn Sie die Aufgabe immer noch nicht ausführen können, fahren Sie fort.



Seitliche Freigabe

Hinweis: Die Seiten sind entscheidend für die Feinmanipulation.

Vergrößern Sie die Öffnung vorsichtig bis zur Seite des Daumens, beginnen Sie mit der Seite, die vom Zeigefinger abgewandt ist.

Dies reicht in der Regel aus, um sehr kleine Clips greifen zu können. Schneiden Sie höchstens eine Seite, um die Struktur zu erhalten. Wenn Sie die Aufgabe immer noch nicht ausführen können, fahren Sie fort.



Vollständige Freigabe

Als letzten Schritt verlängern Sie den Schnitt bis zur Seite des Daumens in der Nähe des Zeigefingers. Zu diesem Zeitpunkt sind nur noch die Druckspitze und der flexible Ring an der Basis übrig.

Dies ist die minimale Abdeckung, die ARTUS unterstützt. Ab diesem Punkt kann die Beweglichkeit oder Passform beeinträchtigt sein.



WARNUNG: Über die Grenzen der Änderung von DigiSkin

- Lediglich der Bereich der Fingerkuppe und die daneben liegenden Seiten können verändert werden.
- Schneiden Sie nicht über die gravierte Linie (1) an den Seiten von DigiSkin hinaus.
- Lassen Sie genügend Material als "flexiblen Ring" (2) übrig. Je mehr, desto besser die Haltbarkeit.
- Schneiden Sie die Druckspitze (Push-Tip) nicht ab. Es ist ein integraler Bestandteil, um die Kräfte auf das Exoskelett zu übertragen.
- Wenn Sie den flexiblen Ring oder die Druckspitze entfernen, rutscht Ihr Finger während der Bewegung aus der Position.
- Entfernen Sie so wenig wie möglich, um die Aufgabe zu erfüllen. Es ist notwendig, Ihre Arbeit an jeden Schnitt anzupassen. Jede Modifikation bringt Kompromisse mit sich.

Kritische Funktionen

